

ワイヤレスイヤホン機能付き集音器
きこエール / KE-SH1 シリーズ

クイックスタートガイド

集音器操作

音量を調節する

※イヤホンを耳に装着して操作してください

音量をあげる



音量をさげる



それぞれの耳を素早く

2回タッチすることで

音量を変更できます

音量は 8 段階調整できます

※イヤホンは左右を確認して装着してください

※ご自身の『聞こえ』の程度に応じて最適な音量に調節してください

集音機能をオン・オフ



- ・左右どちらかのタッチセンサーを 4 秒長押し
- ・集音モードをオフにした後 3 分後自動で電源オフになります

イヤホン操作

電話がかかってきたら

音楽を再生・停止する



左右どちらかのタッチセンサーを 1 回タッチ

※音楽再生時は集音モードをオフにすると聴きやすくなります

※音楽の音量調整は再生機器側で操作してください

電話をとる



左右どちらかのタッチセンサーを 1 回タッチ

※通話時は自動で集音モードがオフになります

着信を拒否する / 電話を切る



左右どちらかのタッチセンサーを 2 秒長押し

充電ケース操作

充電ケースの電池残量を確認したい

充電ケース底面にある
ボタンを1回押す



- ・イヤホン同士の再ペアリング
充電ケースボタンを2回押す
(ケースモニターに111と表示)
※イヤホン機能を使用する際、片耳しか
聞こえない場合にご使用ください

端末と接続する

再生機器（スマートフォンなど）の Bluetooth® をオンに

画面に表示された『新しく検索されたデバイス』から
『KE-SH1』を選択してください。



※端末への接続方法は各メーカーの製品ページをご参照
ください

※イヤホンがBluetooth®通信範囲外(半径10mより外)
に出るとペアリングが切れます

使用中に片側からしか音が出ない場合や、
再生機器とペアリングができない等、動
作が不安定になる場合がございます。
その場合は、リセット操作(初期化)を
行ってください。



詳しくは、製品同梱の取扱説明書をお読みください

高度・重度難聴や、めまい、耳の感染症、耳の痛み、または耳鳴り
などの急性疾患については、医療機関にご相談ください。